

## HOTGEN NOVEL CORONAVIRUS 2019-NCOV ANTIGEN TEST (Nasaltest)

### Schritt 1: Vorbereitung

Bevor Sie die Probe entnehmen, müssen Sie **die Hände gründlich waschen oder desinfizieren**. Handschuhe sind bei dem Selbsttest nicht notwendig. Führen Sie den Abstrich an einem möglichst sauberen Platz durch. Bei dem Selbsttest kann auch ein Spiegel hilfreich sein. Achten Sie bei der Lagerung des Testes sowie bei der Durchführung der Probe auf eine Raumtemperatur von 10~30°C.


Benötigtes Material (Diese Materialien liegen der Verpackung bei):

- 1 Testkassette
- 1 steriles Wattestäbchen
- 1 Extraktionsröhrchen inkl. Tropfenverschluss

### Schritt 2: Tupfer entnehmen

Öffnen Sie die Verpackung des Stäbchens und nehmen Sie das Stäbchen heraus. Während des gesamten Testverlauf den Tupferkopf nicht berühren

### Schritt 3: Probenentnahme

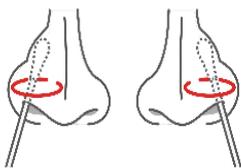

Führen Sie die gesamte Spitze des Tupfers vorsichtig **1,5 cm lang** in ein Nasenloch ein, bis Sie einen leichten Widerstand spüren.

Reiben Sie den Tupfer mit mittlerem Druck langsam in einer kreisförmigen Bewegung **4 Mal für insgesamt 15 Sekunden** an der Innenwand Ihres Nasenlochs.

Wiederholen Sie den gleichen Vorgang mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch.

## Anleitung zum Corona-Schnelltest

### HOTGEN NOVEL CORONAVIRUS 2019-NCOV ANTIGEN TEST (Nasaltest)

#### Schritt 4: Tupfer im Röhrchen tauchen und ausdrücken




Öffnen Sie das Extraktionsröhrchen.

Der Tupfer wird nach der Probenahme in die Flüssigkeit des Extraktionsröhrchens getaucht.

Drehen und drücken Sie 3 Mal.

Die Einweichzeit des Tupfers beträgt mind. 15 Sekunden.

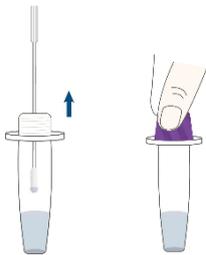

Der Tupferkopf wird ausgedrückt, dann wird der Tupfer herausgenommen und das Extraktionsröhrchen festgezogen / zugemacht.


**Die soeben durchgeführte Probe sollte innerhalb von 1 Stunde getestet werden (Schritte 5 bis 8).**

#### Schritt 5: Öffnen der Testkassette



Öffnen Sie den Aluminiumfolienbeutel der Testkassette, und legen Sie die Testkassette auf eine saubere ebene Fläche.

#### Schritt 6: Probe auf Testkassette geben

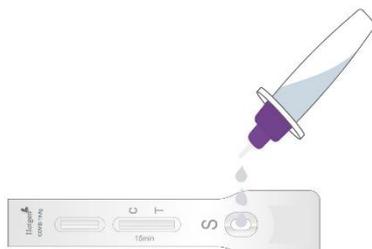

Geben Sie nun 4 Tropfen der behandelten Probe in die Proben Vertiefung der Testkassette.

**HOTGEN NOVEL CORONAVIRUS 2019-NCOV ANTIGEN TEST (Nasaltest)**


**Schritt 7: Abwarten des Ergebnisses**




Beobachten Sie die Ergebnisse auf der Testkassette für **15 Minuten bei 10~30°C**.

*Nach 30 Minuten wird das Ergebnis ungültig.*


**Schritt 8: Auswertung des Ergebnisses**

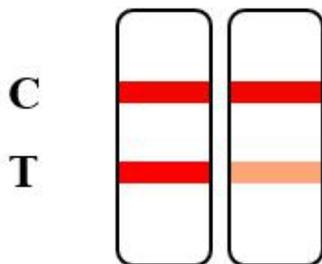

**Ergebnis 1: Positiv**

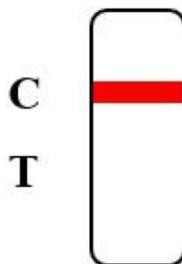

**Ergebnis 2: Negativ**

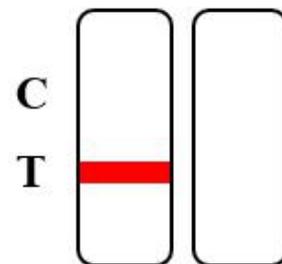

**Ergebnis 3: Ungültig**

(neuen Test durchführen)

**Bei einem positiven Testergebnis bitte die Anlage „Meldebogen bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses“ ausfüllen und an das Gesundheitsamt Rastatt weiterleiten.**

**Zuverlässigkeit:**

Unter Berücksichtigung der oben genannten Schritte und dem Hinweis, dass diese exakt so durchgeführt werden müssen, liegt die Zuverlässigkeit des Hotgen Covid Test bei 97,76%.

**Nach dem Test:**

Alle benutzten Testutensilien geben Sie im Anschluss bitte in eine gesonderte Plastiktüte und entsorgen diese über den Restmüll.

Waschen Sie die Hände gründlich, lüften Sie den Raum und säubern Sie die Unterlage.